

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМОЙ “PATHPRESENTER”

Для просмотра материалов на платформе “Pathpresenter” требуется ПК или мобильный телефон с доступом к сети “Интернет”.

1. Перейдите по ссылке или QR-коду в документе:

### СПИСОК ССЫЛОК НА ПРЕПАРАТЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ I СЕМЕСТРА


#### Практическое занятие № 2

**ТЕМА: РАССТРОЙСТВА КРОВООБРАЩЕНИЯ: ГИПЕРЕМИЯ,  
КРОВОТЕЧЕНИЕ, КРОВОИЗЛИЯНИЕ, СТАЗ**


<https://pathpresenter.net/public/presentation/display?token=53b1ed0c>




2. В новом окне браузера откроется главная страница со списком препаратов:

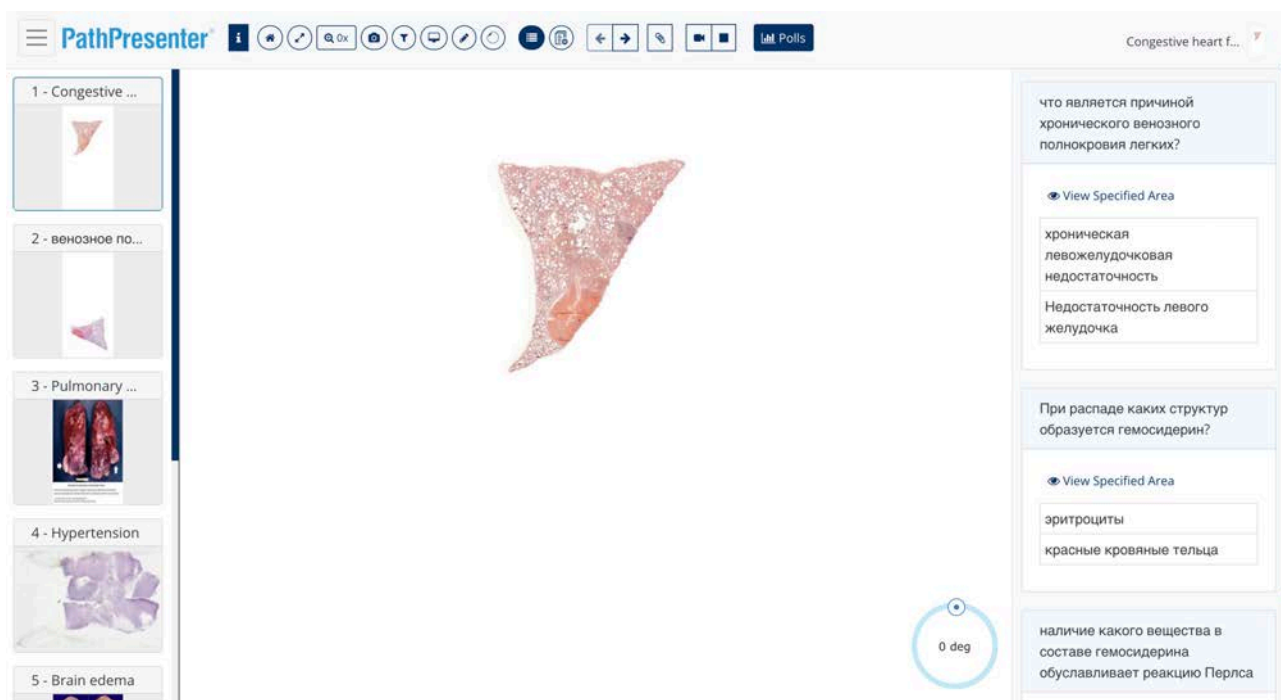


3. Для приближения/отдаления изображения используйте колесико мыши.
4. Открыть/закрыть список слайдов можно с помощью значка с тремя параллельными полосками, расположенного в верхнем левом углу.

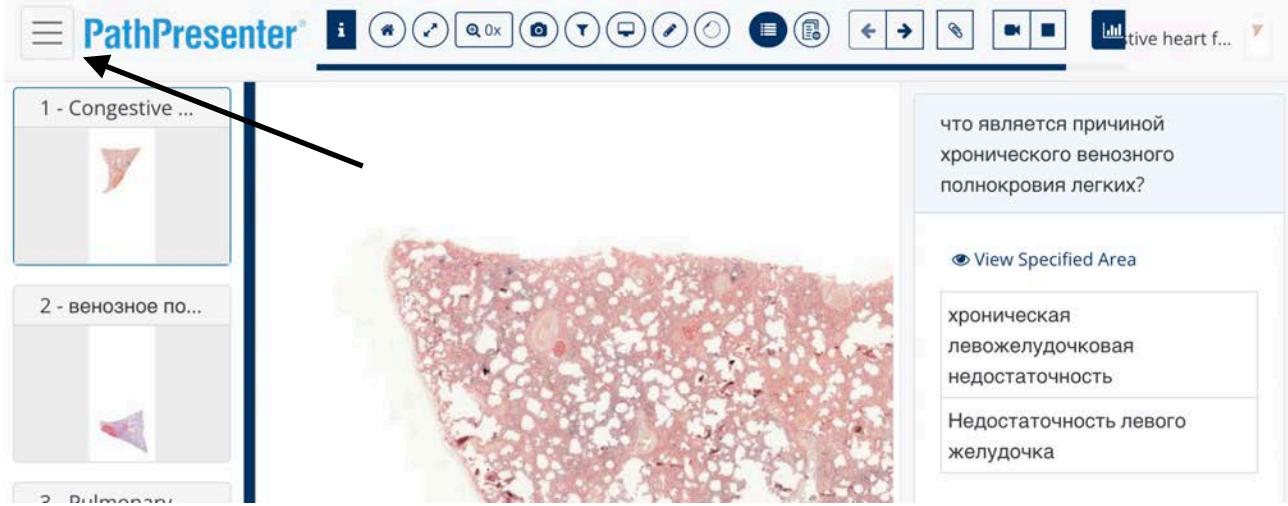


5. Для переключения между слайдами щелкните по картинке слайда в левой части экрана.

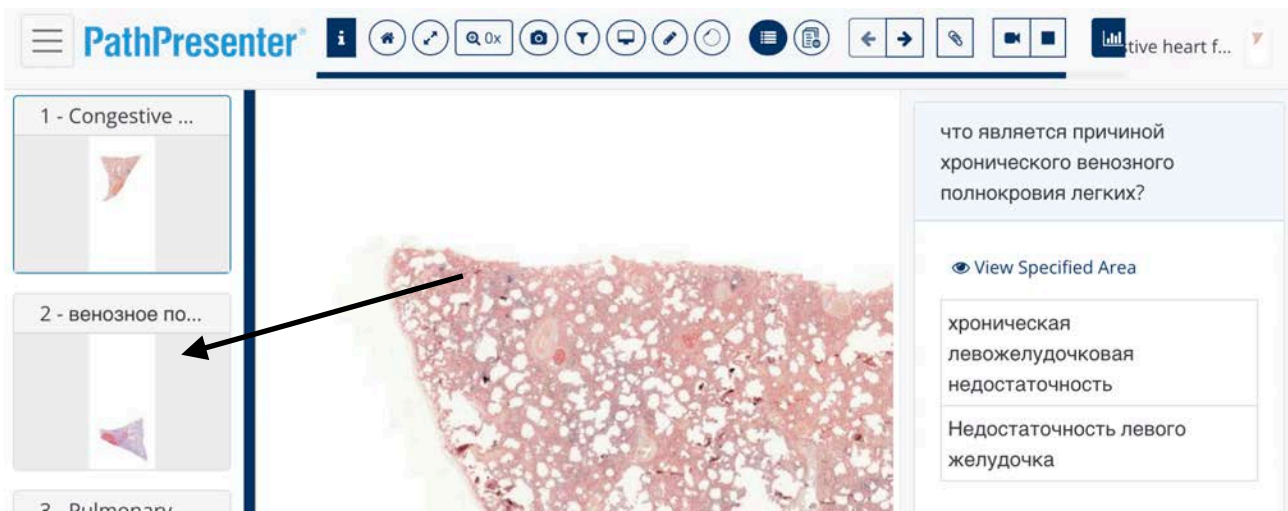


6. Получить информацию о слайде можно нажав значок “i” справа от надписи “PathPresenter”.

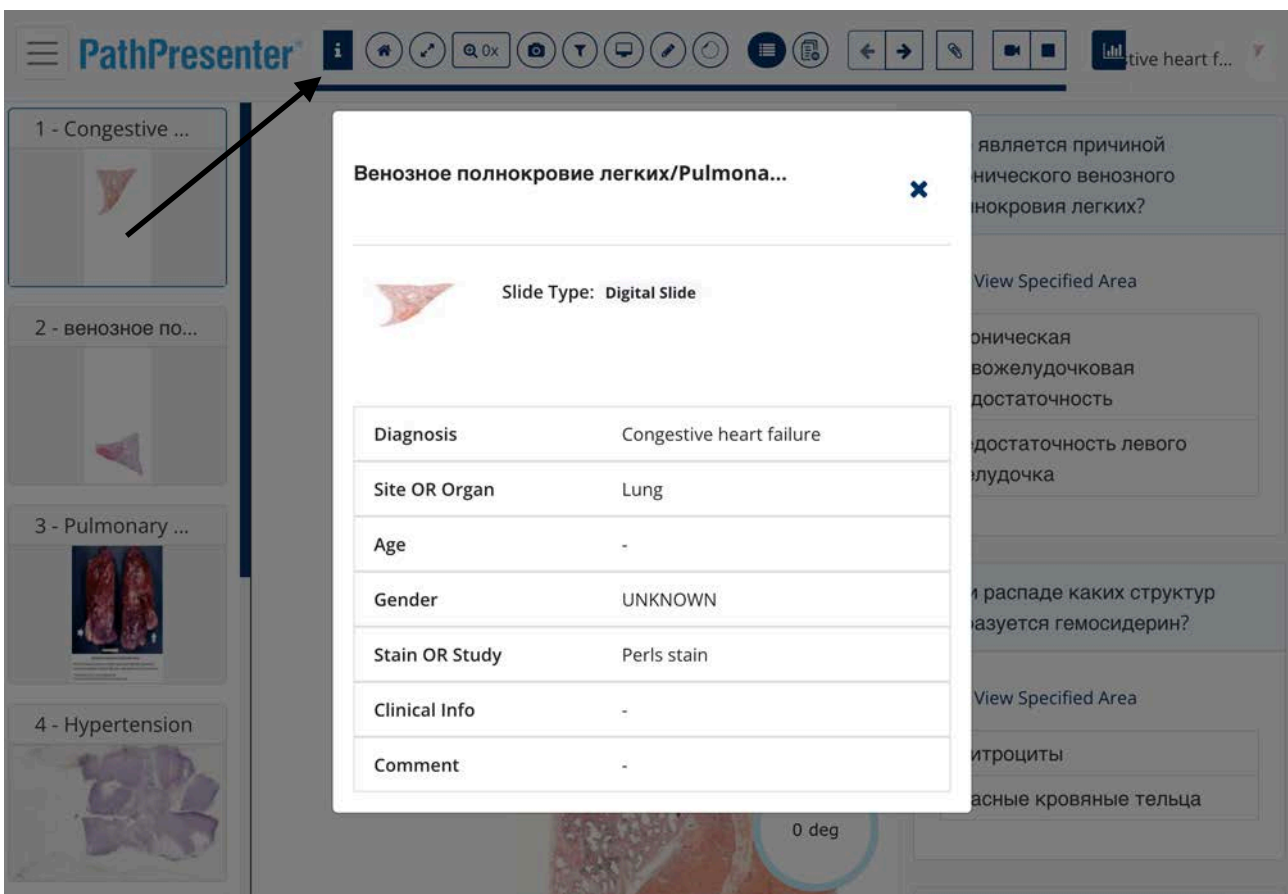


7. Для открытия полноэкранного режима сайта щелкните на значок с двумя разнонаправленными стрелками

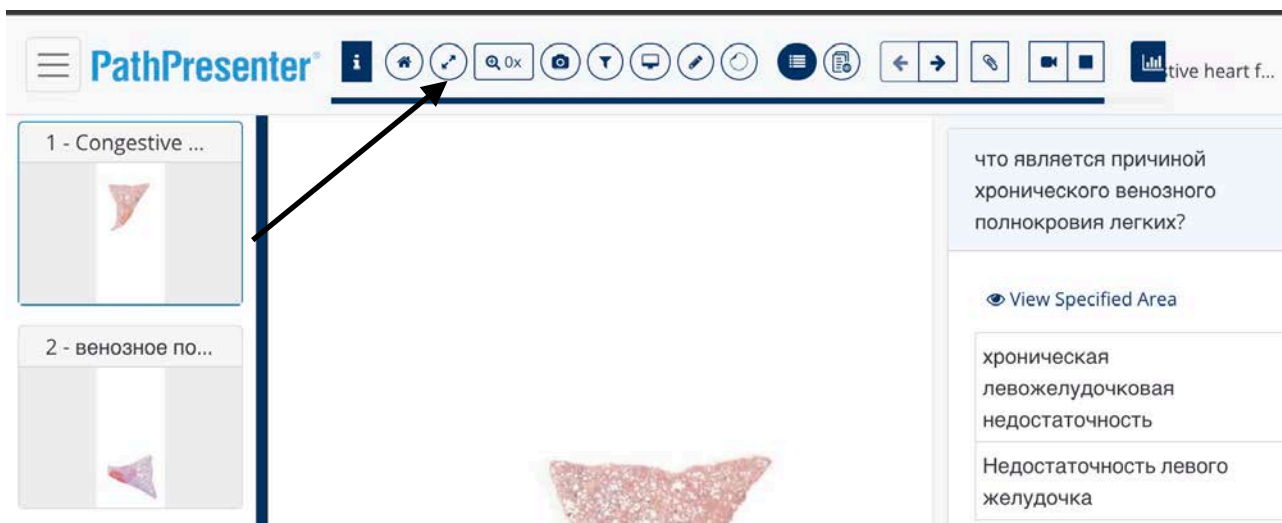

8. Для создания фотографии нажмите на значок “фотокамера” в верхней части экрана. Выберите нужный формат изображения и нажмите кнопку “Download” в нижнем правом углу открывшегося окна.

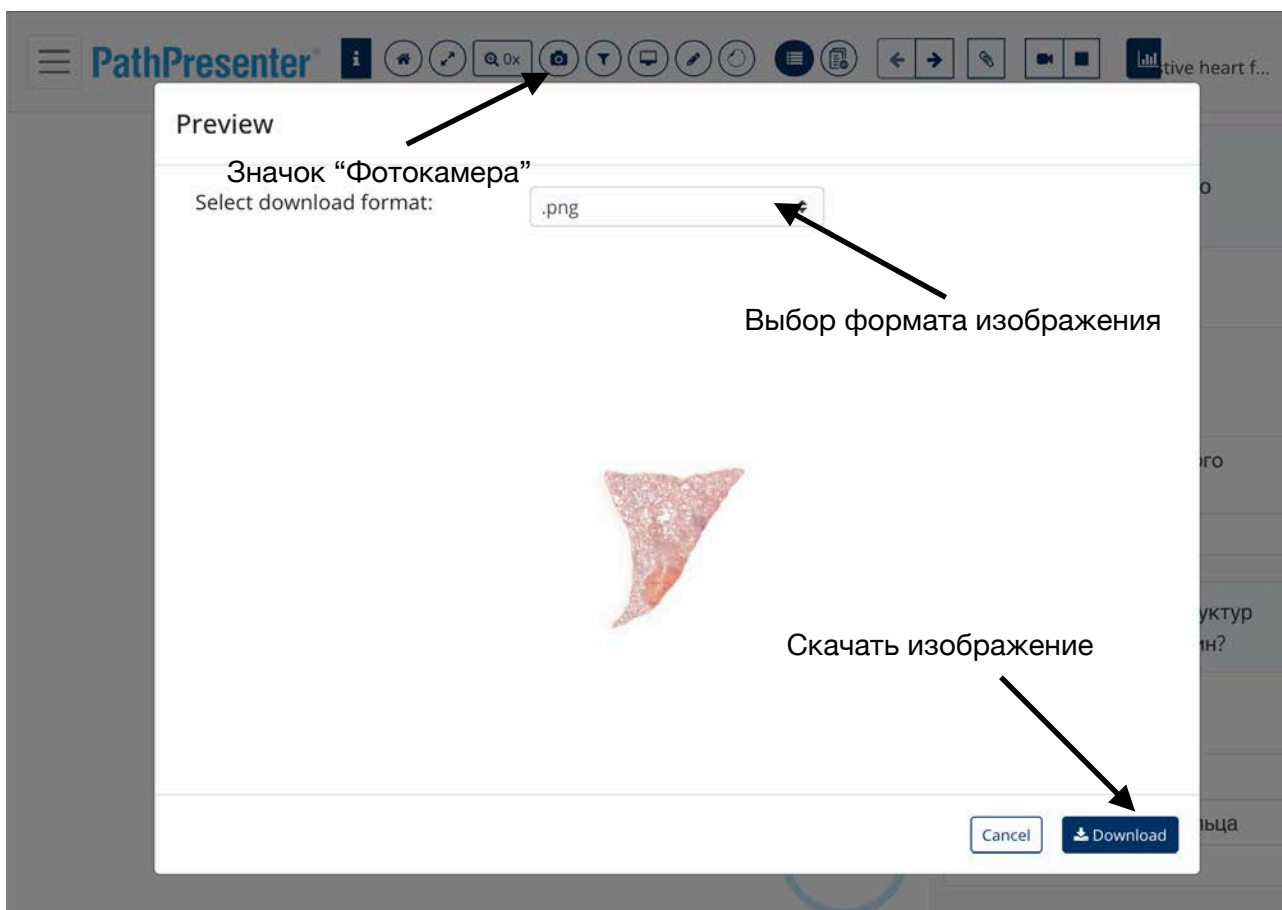

9. Чтобы посмотреть аннотации щелкните на значок “списка” в правой стороне экрана. Для просмотра интересующей аннотации выберите ее из списка справа.

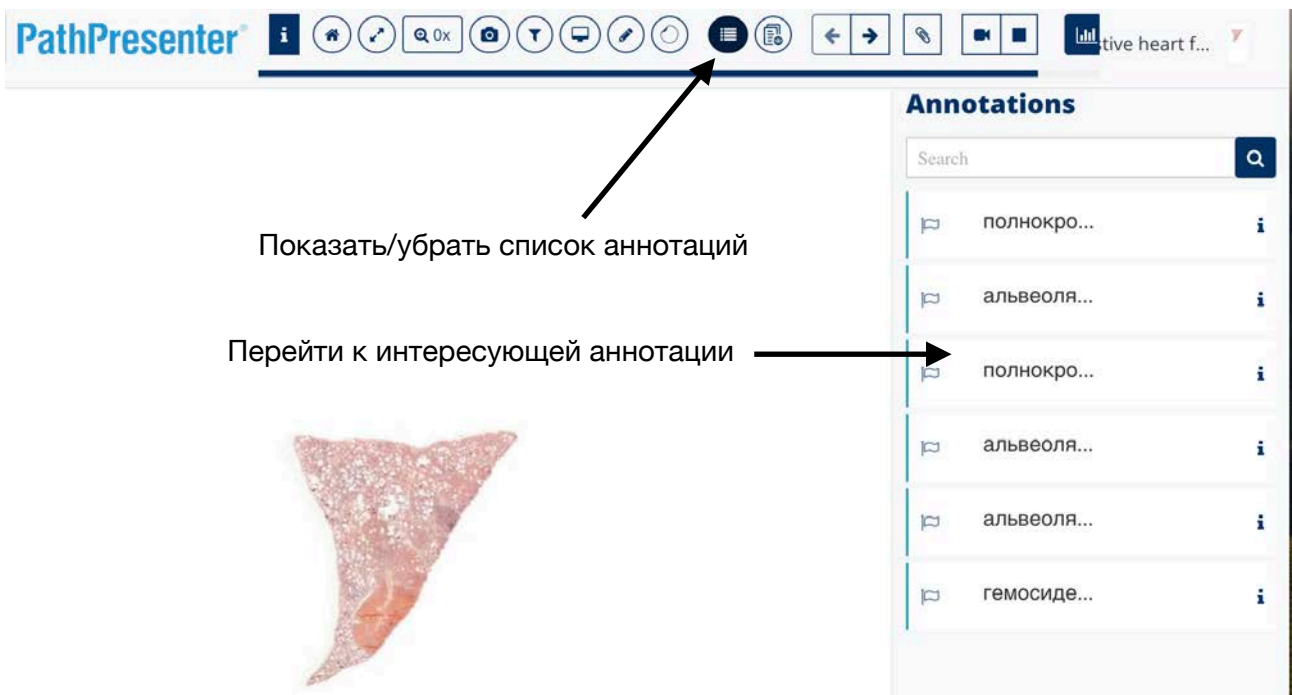

10. Чтобы отобразить все аннотации из списка на изображении, щелкните по значку “show all annotation”. Убрать все аннотации можно с помощью кнопки “clear”.

